

ООО «ЛИМТ»

Программный пакет

«Диспо»

**Серии Врач, Лаборант, Регистратор,
Администратор**

Руководство по установке



Оглавление

Глава 1:	Описание	3
Глава 2:	Характеристики программного обеспечения:	3
Глава 3:	Технические требования к установке и эксплуатации:.....	3
Глава 4:	Инструкция по установке:	5
Глава 5:	Начало работы:	5

Глава 1: Описание

Программа предназначена для ввода результатов медицинских обследований, сохранения в цифровом виде результатов медицинских обследований, анализа результатов медицинских обследований.

Область применения – медицина, предназначено для работы в медучреждениях широкого профиля

Глава 2: Характеристики программного обеспечения:

ПО разделено на модули, выполняющие следующие функции:

- модуль «Диспо», серии Врач - предназначен для просмотра и оценки изображений (CR), КТ, УЗИ, МРТ.
- модуль «Диспо», серии Лаборант - предназначен для получения изображений с устройства «Цифровая кассета высокого разрешения» и с устройства цифровой детектор с плоской панелью в режиме цифровой рентгенографии;
- модуль «Диспо», серии Регистратор - предназначен для регистрации пациентов на обследование;
- модуль «Диспо», серии Администратор - предназначен для создания учетных записей пользователей;
- модуль «Диспо», серии Сервер - предназначен для хранения результатов медицинских обследований;
- модуль получения изображений с устройства «Цифровая кассета высокого разрешения» - предназначен для получения изображений со сканера цифровой кассеты и их последующей обработки. Модуль входит в состав модуля «Диспо», серии Лаборант;
- модуль получения изображений с устройства компьютеризированной радиографии (CR), КТ, УЗИ, МРТ – предназначен для получения медицинских изображений компьютерной рентгенографии, компьютерной томографии, ультразвуковых исследований, магнитно-резонансной томографии и их оценки. Модуль входит в состав модуля «Диспо», серии Врач;
- модуль получения изображений с устройства цифровой детектор с плоской панелью в режиме цифровой рентгенографии – предназначен для получения цифровых рентгеновских изображений и их последующей обработки. Модуль входит в состав модуля «Диспо», серии Лаборант;
- модуль беспроводного и проводного подключения цифрового детектора к АРМ рентгенолаборанта – предназначен для обеспечения двух режимов работ детектора (проводного/беспроводного). Модуль входит в состав модуля «Диспо», серии Лаборант.

Глава 3: Технические требования к установке и эксплуатации:

- Системный блок:

- Частота процессора не ниже 1,8 ГГц
 - Оперативная память, не менее 2 Гб
 - Жесткий диск, не менее 120 Гб
- Монитор:
 - Диагональ не менее 17"
- Клавиатура
- Мышь
- Операционная система - Microsoft Windows 7 или более поздняя версия

Глава 4: Инструкция по установке:

1. Скачать образ виртуальной машины с ПО «Диспо» по ссылке....
2. Открыть приложение Hyper-V Manager
3. В меню action выбрать import virtual machine
4. Импортировать образ виртуальной машины dispo.VHDX
3. При первом запуске подождать загрузку сервера около 5 минут

Глава 5: Начало работы:

1. На рабочем столе выбрать ярлык, соответствующий нужному для работы модулю:
 - модуль «Диспо», серии Врач - ярлык Диспо - просмотр снимков.
 - модуль «Диспо», серии Лаборант (получения снимков с кассеты) - **Диспо - получение снимков CR.**
 - модуль «Диспо», серии Лаборант (получения снимков с детектора) - **Диспо - получение снимков DX.**
 - модуль «Диспо», серии Регистратор/серии Администратор - **Диспо - Веб-администрирование.**
2. В поле «логин» ввести dispo.
3. В поле «пароль» ввести dispo.

Внимание! Нельзя одновременно запускать несколько модулей.